



# DECOWIN

**Spray Nasale** multidose senza conservanti classificato come  
Dispositivo Medico Classe I



## DESTINAZIONE D'USO

Il prodotto risulta utile nei casi di irritazione e secchezza della mucosa nasale grazie all'azione protettiva, lubrificante e lenitiva svolta dagli ingredienti che lo costituiscono.

Il prodotto contiene infatti acido ialuronico, componente che grazie alle proprietà mucoadesive, forma un film che aderisce alla mucosa nasale favorendone l'idratazione, e di conseguenza esercitando un'azione lenitiva, e proteggendola da stimoli pro-irritanti; la funzione barriera dell'acido ialuronico è inoltre coadiuvata dai polisaccaridi presenti nell'estratto di malva, che a contatto con l'acqua rigonfiano formando uno strato colloidale. Malva, Mastiha e olio essenziale di eucalipto contribuiscono alla protezione della mucosa nasale dallo stress ossidativo mediante azione meccanica di scavenger dei radicali liberi, responsabili dei danni ossidativi. Il sale marino presente nel prodotto incrementa infine la tonicità del prodotto e, agendo per osmosi, favorisce la rimozione del muco in eccesso. Mastiha e olio essenziale di eucalipto contenuti nel prodotto possiedono anche un'azione igienizzante.

Il prodotto è senza conservanti: ciò è reso possibile grazie all'utilizzo dell'erogatore brevettato che, filtrando l'aria in ingresso, previene la contaminazione microbiologica del contenuto. L'assenza di conservanti aumenta la tollerabilità del prodotto riducendone il potenziale irritante.

## INGREDIENTI

Acqua depurata; acqua di mare atomizzata; acido bórico; idrossipropilmetilcellulosa (HPMC); sodio tetraborato; sodio cloruro; malva e.s.; polisorbitato 20; olio di Chios Mastiha; acido ialuronico da sodio ialuronato; eucalipto o.e.

## MODALITÀ D'USO

2 erogazioni per narice, 2/4 volte al giorno, o secondo necessità. Rimuovere il cappuccio di protezione dall'erogatore, inserire l'erogatore nella narice ed esercitare una pressione sullo stesso per erogare il prodotto. Prima e dopo l'utilizzo, soffiare il naso per eliminare il muco. Pulire l'erogatore dopo l'utilizzo. Richiudere l'erogatore con l'apposito cappuccio di protezione.

## CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente (5°C-25°C), al riparo da raggi solari.  
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.

## DATA DI VALIDITÀ DALLA PRIMA APERTURA

30 giorni. Eliminare l'eventuale contenuto residuo 30 giorni dopo la prima apertura.

## AVVERTENZE

- Non utilizzare il prodotto se allergici o con ipersensibilità nota ad uno qualsiasi dei componenti
- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata
- Non utilizzare il prodotto dopo 30 giorni dalla prima apertura
- Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Non ingerire
- Utilizzare esclusivamente per via nasale
- Utilizzare esclusivamente su mucosa integra
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'utilizzo
- Se i sintomi persistono dopo 10 giorni di utilizzo del prodotto, sospendere l'uso e consultare il medico

**Pharmawin s.r.l.** | Via S. Lattuada 27, 20135 Milano | [www.pharmawin.it](http://www.pharmawin.it)

 **Pharmaxima S.r.l.** | Via Volta, 2/A 20090 Trezzano S/N (MI)



Data di Revisione 03/2021